

OUANTUM[®] #1 FOR REHAB POWER

FOR REFERENCE ONLY

<u>Guide de programmation BT</u> <u>sur QLogic 3 - Windows / Android</u>





NOTES

TABLE DES MATIERES

Activation du BT sur Manipulateur ou Affichage Optimisé	4
Appairage BT	7
Configuration de la souris BT1	1

Activation du BT sur Manipulateur ou Affichage Optimisé

Aller dans le menu Auxiliaire de votre manipulateur Puis suivre les menus ci-dessous pour définir le type de connexion BT désirée Contrôler et valider le type d'utilisation souhaitée, dans ce cas Souris Valider la case Souris par une action à droite au joystick



Revenir ensuite dans le menu Auxiliaire pour rendre visible le BT QL3 pour appairage





Appairage BT

Le BT de la QL3 est maintenant visible par votre appareil, sous ID : 3881 Vous pouvez lancer une recherche sur votre PC ou Smartphone Ajouter un appareil BT

Paramètres	- D ×
☆ Accueil	Appareils Bluetooth et autres
Rechercher un paramètre	Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil
Périphériques	
	Bluetooth
Appareils Bluetooth et autres	Activé
品 Imprimantes et scanners	Maintenant détectable en tant que « CMONOT_ACER »
() Souris	Souris, clavier et stylet
Pavé tactile	Mouse3182 Pilote indisponible
📾 Saisie	Mouse3881
🖉 Stylet et Windows Ink	O Pilote indisponible
Exécution automatique	Mouse4152 Pilote indisponible
🖞 USB	Mouse5099 Pilote indisponible
	Mouse7735 Pilote indisponible
	USB Receiver
	Audio
	DisplayLink USB Graphics Device



Votre appareil retrouve le BT de la QL3 sous Mouse 3881





Il suffit maintenant de cliquer sur Connecter sur votre appareil

Et de valider avec le joystick en avant sur votre FRE



Votre souris BT est maintenant appairée à votre appareil et prête à l'emploi

La barre en haut de votre écran du FRE ainsi que la souris sont bleus, ce qui indique la connexion BT avec votre appareil

Configuration de la souris BT

Vous pouvez maintenant faire vos différents tests d'utilisation, et modifier les paramètres de la souris, des clics, de la vitesse de déplacement Tout ceci se fait via le logiciel ECON-W

Pour les différents modes de clics souris, vous avez une explication sur le bas de page



PRIDE MOBILITY PRODUCTS FRANCE - 26 rue Monseigneur Ancel, 69800 St Priest

Page 11 sur 11