

| | |
|-------------|--|
| Référence | Go Talk |
| Fabrication | Attainment Company's, Inc P.O. Box 930160 - 504 Commerce Parkway Verona - WI 53593-0160 - USA ☎ 00 1-608-845-7880 www.attainmentcompany.com |
| Importation | Protéor Handicap Technologie 6 rue de la Redoute - Z.I. Saint-Apollinaire BP 37833 - 21078 Dijon cédex ☎ 03 80 78 42 42 www.proteor.fr |
| Prix | 476 € TTC |

INTRODUCTION



GoTalk est un petit appareil de communication qui, comme son nom l'indique en anglais, peut être emporté partout pour parler : à l'école, à l'extérieur, pendant des activités. Il est léger, robuste, et d'un emploi facile. Il utilise de la voix digitalisée (comme AlphaTalker ou MessageMate cf. fiches 6-5 ; 6-6) et doit donc être programmé par une tierce personne qui prête sa voix pour préenregistrer les messages. Pour cette raison, comme tous les appareils qui utilisent de la voix digitalisée, l'utilisateur ne peut pas programmer lui-même ses messages : il ne peut que juxtaposer ceux qui ont été enregistrés par quelqu'un d'autre.

Son clavier de 9 cases est conçu pour recevoir des pictogrammes ou des images.


GoTalk est de ce fait destiné à une population d'enfants jeunes ou plus âgés mais polyhandicapés, n'ayant pas la possibilité prochaine d'apprendre à écrire.

PRÉSENTATION

Grâce à sa poignée intégrée, il est facile à transporter. Ses 9 cases donnent accès à 36 messages répartis sur 4 niveaux de 9 messages. GoTalk est solide : le corps est un bloc moulé en plastique résistant aux chocs (ne se fissure pas). Le haut parleur est muni d'une grille de protection. Sur la notice, on vous le montre qui prend des coups et fait des chutes... l'essayeriez-vous ?


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 470 g.
- Taille : 22,5 x 30 x 2 cm
- Taille des cases : 5,5 x 5 cm
- Temps d'enregistrement : 6 mn
- Volume sonore réglable par l'utilisateur
- Alimentation 2 piles Alcalines AA

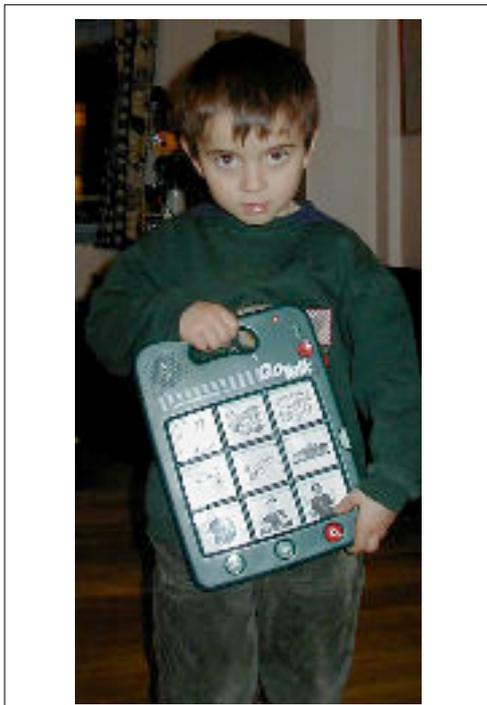



Même à table !

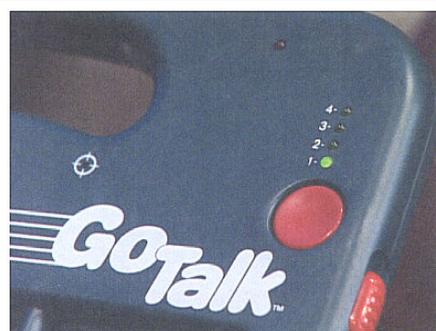

Diode niveau 1



"J'aime pas !"



"Génial !"

© APF 2002

RÉSEAU NOUVELLES
TECHNOLOGIES

☎ 03 20 20 97 70

AUTEUR

ÉLISABETH NÈGRE

Conseillère technique
en communication alternative
APF RNT - Paris ☎ 01 40 78 27 37
elisabeth.cataix-negre@apf.asso.fr

JUIN 2002

UTILISATION

Il suffit d'appuyer sur une des neuf cases pour émettre un message. Le volume sonore peut se régler à l'aide de deux touches distinctes, qui, à l'appui, relisent le message en cours plus ou moins fort. L'utilisateur a quatre fiches de neuf cases correspondant aux quatre niveaux de l'appareil.

N.B. : On peut stocker les fiches les unes au-dessous des autres, mais on diminue d'autant la sensibilité des touches. Chaque fiche peut être remplacée par une autre ; on peut les numéroter ou procéder à une indexation de couleur pour rendre leur utilisation en niveaux plus facile.

Pour changer de niveau, on appuie sur la touche rouge qui allume une diode de niveau. Pendant que cette dernière clignote, on réappuie sur cette touche rouge pour faire passer le voyant au niveau suivant.

On utilise les niveaux, soit pour une utilisation de l'appareil par différents utilisateurs, soit par le même, dans différents environnements.



ENREGISTREMENT

- ▷ Appuyer et maintenir la touche rouge d'enregistrement jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.
- ▷ Appuyer sur la touche message et parler normalement.
- ▷ Appuyer sur une touche quelconque pour arrêter.

GoTalk dispose d'une durée totale d'enregistrement de 6 mn mais le temps n'est pas librement réparti : les touches messages à gauche, au milieu de la rangée et en haut disposent de 15 secondes ; les autres touches de 8,5 secondes.

En revanche, les messages sont conservés même si les piles sont déchargées.

Pour effacer, il suffit de réenregistrer un message sur l'ancien message.

CONCLUSION

Go Talk est un petit appareil qui permet des actes de langage oralisés dans des situations précises et le plus souvent très limitées.

36 messages ne peuvent se concevoir sans l'utilisation conjointe et permanente d'un tableau de communication, riche en lexique, et informatif.

Personne ne peut se satisfaire de 36 messages... En revanche, si le cadre est ainsi posé, la prise de parole est facile et de bonne qualité. L'appareil est maniable et le prix tout à fait compétitif.

Mais attention à ne pas mettre le prix bas en critère de choix : l'équipement Go Talk n'est ni ambitieux ni évolutif !